

Високоєфективний гемостатик – гель на основі 25% сульфату алюмінію

## ■ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕВАГИ:

- Зупинка кровотечі та зменшення запальних явищ при здійсненні ретракції ясен, при проведенні процедур зі зняття відбитків, при реставраціях V класу та інше.
- Зменшення виділення сулукарної рідини в ході фіксації непрямих адгезивних реставрацій.
- Препарат призначений для місцевого використання і може бути використаний як із просоченими, так і з непросоченими нитками.
- Не забарвлює ділянки, що препаруються, та канини зуба.

## ■ СКЛАД:

- Сульфат Алюмінію U.S.P. – 25,0%
- 8-гідроксигінолін – 0,1%
- Забарвлений гель з ароматом мигдалю – до 100%.

## ■ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Не виявлено.

## ■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

- Зафіксуйте канюлю на шприц. Видавіть тонку смужку гелю на ділянку слизової, які кровоточать. Виберіть потрібний розмір нитки і упакуйте її в гель. Почекайте 2-6 хвилин.
- У випадку, якщо кровотеча триває, промийте

ділянку водою з водо-повітряного пістолета і потім нанесіть гель повторно.

- Видаліть нитку. Промийте оброблену ділянку і висушіть. Знімайте відбитки згідно з загальноприйнятою методикою.

## ■ СПЕЦІАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Рекомендується використання як при стандартній техніці пакування так і при техніці пакування подвійної нитки. При техніці пакування подвійної нитки упакуйте спочатку нитку малого розміру, а потім більшого. Нитка малого розміру може бути залишена при знятті відбитка, а потім видалена.

## ■ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Уникайте контакту препарату зі шкірою та очима, оскільки це може спричинити подразнення. Якщо контакт все-таки стався, промийте ділянку великою кількістю води. У випадку потраплення препарату всередину спровокуйте блювотний рефлекс або зверніться за допомогою до лікаря (відповідної кваліфікації).

## ■ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

Зберігати за кімнатної температури в захищеному від світла місці, щільно закрити ковпачок після використання. Термін зберігання за кімнатної температури – 2 роки. Охолодження матеріалу до 4-8 °C збільшує термін зберігання. Не заморозувати!

## ■ УПАКОВКА:

- Шприц 5 мл, набір канюль.

№ UA.TR.101

Дата останнього перегляду 17 грудня 2020 р.  
Представник керівництва підприємства з якості  
головний інженер: Полтанов В.М.



ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ

ВИРОБНИЦТВО: ТОВ «ДЖЕНДЕНТАЛ-УКРАЇНА»

