

35% Гідроксид кальцію на водній основі

Calci-Jen – це пастоподібний препарат гідроксиду кальцію на водній основі для покриття пульпи і тимчасового пломбування кореневих каналів. Високу біологічну активність препарату обумовлюють особлива технологія виготовлення, що включає в себе субмікронне подрібнення частинок гідроксиду кальцію, та спеціальна обробка, яка запобігає їх пасивації. Завдяки тонкому гранулометричному складу препарат легко проникає навіть у найтонші бічні каналці. До наборів Calci-Jen входять також змінні канюлі, які забезпечують точність внесення препарату і дозволяють уникнути перехресного зараження.

●● Призначення

- Непряме покриття пульпи з метою її захисту.
- Пряме покриття оголеної ділянки пульпи або при пульпектомії.
- Як ізолюючий матеріал для запобігання контакту дна глибокої порожнини поблизу пульпарної зони з кислим середовищем цементів або композитних матеріалів, а також для стимуляції росту склерозованого та вторинного дентину в цій ділянці.
- Як тимчасове пломбування кореневих каналів.
- Може використовуватися для лікування кіст, абсцесів, ерозій та апексифікації.

●● Спосіб застосування

При прямому і непрямому покритті пульпи:

Очистіть і ретельно висушіть поверхню порожнини. Надіньте канюлю на шприц із Calci-Jen. Нанесіть матеріал тонким шаром на підготовлену поверхню. Просушіть порожнину з нанесеним матеріалом струменем повітря. Уникайте потрапляння пасти на краї порожнини і очищайте їх під час випадкового потрапляння. Потім покрийте дно порожнини прокладочним матеріалом і додержуйтеся процедури звичайної реставрації.

При ендодонтчному лікуванні кореневих каналів:

При тимчасовому пломбуванні з метою ендодонтчного лікування в першу чергу інструментально обробіть і очистіть кореневий канал (наприклад, використовуючи 3% розчин перекису водню з подальшим промиванням гіпохлоритом натрію), а потім наповніть канал за допомогою обертового інструмента типу Lentulo або спеціальної канюлі для кореневих каналів (типу Navi-Tips (Ultradent)). Потім закрийте порожнину пломбувальним матеріалом, додержуючись стандартної процедури. Рекомендується контролювати всі стадії пломбування кореневих каналів радіографічно. Закривайте шприц негайно після використання.

●● Застереження

- Післяопераційна чутливість: при виході матеріалу за верхівку кореня може відчуватися певний дискомфорт (чутливість до накушування або відчуття розпирання), але, зазвичай, подібні симптоми зникають через 24 – 48 годин.
- Протипоказання або побічні дії: не виявлені.
- Не використовуйте затверділу або засохлу пасту.
- Не використовуйте матеріал після закінчення терміну придатності.

●● Зберігання і термін придатності

- Зберігати при кімнатній температурі в захищеному від світла місці, щільно закривати ковпачок після використання.
- Термін зберігання – 2 роки.
- Охолодження матеріалу до 4 – 8 °C збільшує термін зберігання.
- НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

●● Утилізація


Утилізувати медичний виріб відповідно з локальними / регіональними / національними / міжнародними вимогами законодавства.

●● Упаковка

Шприці 2 мл, набір канюль.

№ UA.TR.101

Дата останнього перегляду 17 грудня 2020 р.
Представник керівництва підприємства з якості,
головний інженер: Полтанов В.М.

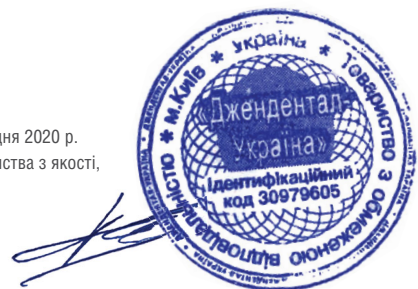

ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ!

ВИРОБНИЦТВО: ТОВ «ДЖЕНДЕНТАЛ-УКРАЇНА»